


FIV Ab + FeLV Ag

Szybki test immunochromatograficzny do równoczesnego wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi niedoboru odporności kotów oraz antygenów wirusa białaczki kotów w krwi.

Sposób wykonania testu:

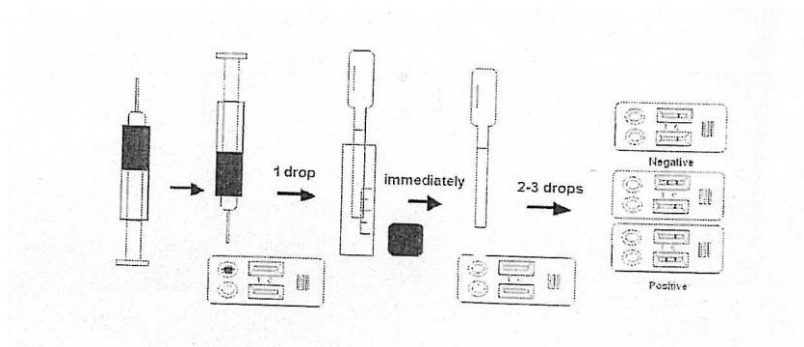


- pobrać próbkę (krew pełna, surowica lub osocze kota)
- wyjąć kasetkę z folii i położyć na stole
- nałożyć 1 kroplę próbki i natychmiast po tym 2-3 krople buforu do okienka próbkowego
- odczytać wynik po 10 - 15 minutach
- wyniki po 15 minutach są nieważne

Interpretacja wyniku badania:

dodatni: obecność dwóch prążków, zarówno na linii kontrolnej (C) jak i na linii testowej (T)

ujemny: pojawia się tylko prążek na linii kontrolnej

nieważny: brak prążka na linii kontrolnej (niezależnie od tego czy pojawi się prążek na linii T)

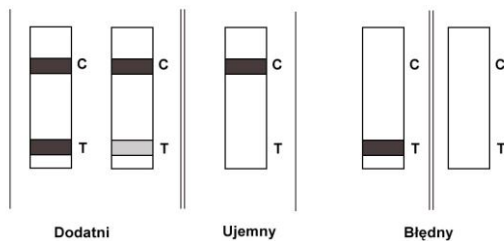

Termin ważności podany na opakowaniu.

Tylko do użytku weterynaryjnego.